

VARROX® EDDY

Évaporateur autonome avec batterie interchangeable contre le varroa



Varrox® Eddy est le premier évaporateur avec batterie interchangeable qui permet de traiter jusqu'à 18 colonies !



Le kit se compose de :

- 1 coffret Varrox® Eddy :
 - 1 ou 2 batterie(s) Li-Ion Technology (selon le coffret choisi)
 - 1 chargeur (input : 100–240V AC0,6A - output : 21V DC1A)
- 1 unité de base
- 2 récipients creusets pour accueillir la poudre
- 1 cuillère doseuse

Varrox® Eddy est le premier évaporateur avec une batterie technologie Li-Ion interchangeable. Plus nécessaire de transporter un générateur électrique ou une lourde batterie de voiture. Varrox® Eddy est léger, maniable et facile à utiliser.

- Il pèse moins de 600g batterie incluse.
- Grâce aux voyants LED, l'apiculteur peut suivre l'évolution du traitement à distance.
- Une batterie entièrement chargée permet de traiter jusqu'à 18 colonies (36 avec 2 batteries).
- Le temps de charge complet de la batterie est de 4 heures.

AVANTAGES

- ✓ Batterie intégrée et interchangeable
- ✓ Longue charge
- ✓ Léger et maniable
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Sécurité pour l'apiculteur

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Période d'utilisation :

J F M A M J J A S O N D

● Optimal ● Possible

Utilisable pour le traitement d'hiver de novembre à janvier sur toutes les colonies exemptes de couvains. Varrox® Eddy peut être utilisé en traitement d'été lors d'une interruption de ponte et après la récolte du miel.

MODE D'EMPLOI



1. Préparer l'évaporateur

Muni de vos EPI, versez la quantité souhaitée de poudre dans le récipient creuset à l'aide de la cuillère doseuse.

1 cueillère doseuse = 1g d'acide oxalique dihydraté

Remarque: le trou d'envol doit être d'au moins 15 mm de haut et 90 mm de large.



2. Installer l'évaporateur

Positionnez Varrox® Eddy sous la grappe hivernale et bouchez le trou d'envol avec de la mousse ou du tissu



3. Mise en route de l'évaporateur

Démarrez Varrox® Eddy en appuyant 3 secondes sur le bouton « marche ». La durée du traitement et la température sont contrôlées électroniquement.

Pour toutes questions ou demandes d'informations vous pouvez contacter :
Marion Bétend - +33 7 48 13 14 04 - marion.betend@andermatt.fr